



LED

Manual de Instruções

Agradecemos por investir no Negatoscópio. Ele é fabricado com todo cuidado a fim de garantir qualidade insuperável.

Apenas os melhores materiais são utilizados para assegurar-lhe um aparelho de excelente desempenho e confiabilidade.

Leia as instruções a seguir para que o Negatoscópio seja utilizado apenas para a finalidade a que se destina e você possa usufruir deste produto por longos anos.

Descrição geral

A linha de Negatoscópios MD utiliza a tecnologia LED para produzir uma iluminação uniforme com vida útil prolongada e consumo eficiente de energia.

Especificações


Modelo	JD-01AIII: 1 Corpo
	JD-01BIII: 2 Corpos
	JD-01CIII: 3 Corpos
	JD-01DIII: 4 Corpos
Tensão de alimentação	90-240 V AC, 50 Hz
Consumo de energia	JD-01AIII: 23W
	JD-01BIII: 46W
	JD-01CIII: 69W
	JD-01DIII: 92W
Lâmpada	LED
Vida útil da lâmpada	100.000 horas
Dimensões	JD-01AIII: Total: 500 x 510 mm Tela: 355 x 430 mm
	JD-01BIII: Total: 855 x 510 mm Tela: 710 x 430 mm
	JD-01CIII: Total: 1250 x 510 mm Tela: 1065 x 430 mm
	JD-01DIII: Total: 1530 x 530 mm Tela: 1420 x 430 mm
	Peso líquido

Montagem

O equipamento deve ser suspenso na parede por meio de parafusos que se encaixam nos orifícios da parte de trás da unidade.

Escolha uma posição para que o equipamento esteja em uma altura adequada e alcance de uma tomada elétrica. Fixe parafusos de tamanho adequados na parede, observando a distância entre os orifícios da parte de trás da unidade.

Suspenda o equipamento prendendo-o nos parafusos.

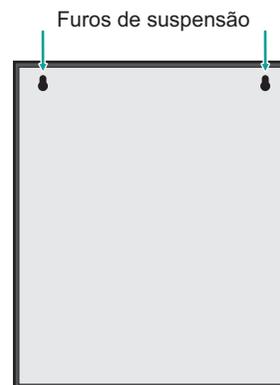


Alimentação

Conectar o cabo de força no equipamento e a uma tomada elétrica.

Ligue o interruptor no lado inferior direito do equipamento.

Desligue o equipamento quando não estiver em uso.

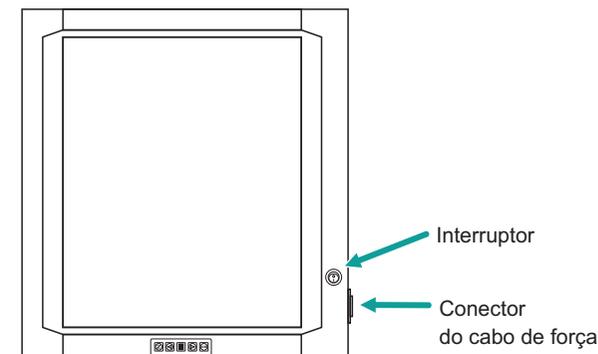

Obs: Desconecte-o da tomada se não for utilizado por um longo período.

Avisos

Atenção: Este produto não deve ser utilizado na presença de gases inflamáveis.

Aviso: Este produto não deve ser imerso em líquidos.

Cuidado: Choque elétrico.


Corrente alternada.

Descarte de modo seguro.

Manutenção

O Negatoscópio MD não requer nenhuma manutenção específica. Caso seja necessária a verificação do aparelho, por qualquer razão, entre em contato com a assistência técnica autorizada.

Operação

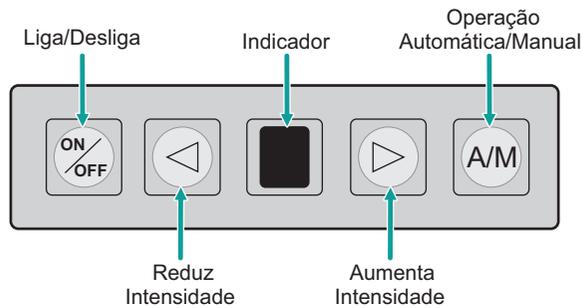

Com o equipamento ligado à rede elétrica, pressione o botão **ON/OFF** para iluminar o visor. O indicador piscará.

Utilize os botões de aumentar ou reduzir a intensidade para alterar a iluminação do visor. Enquanto estes botões estiverem pressionados, o indicador piscará e deixará de piscar ao atingir o limite de ajuste de intensidade.

O botão **A/M** seleciona o funcionamento em modo automático ou manual. Em operação automática o indicador acende e, em operação manual, o indicador permanece desligado.

Enquanto no modo automático, ao inserir uma radiografia no suporte localizado na parte superior do visor, o mesmo irá iluminar. Retire a radiografia e o visor se apaga.

Se o visor não acender quando a radiografia for inserida, retire a radiografia, verifique se o equipamento está em modo de operação automática e, em seguida, tente inserir a radiografia novamente.

Nota: a operação automática só funciona corretamente quando o equipamento estiver na posição vertical. Esta modalidade não funciona com o equipamento colocado na posição horizontal (exemplo, em uma mesa ou bancada).

Pressione o botão **ON/OFF** para desligar o visor após a utilização.

Limpeza

Recomenda-se limpar o Negatoscópio MD com um pano, macio, limpo e seco. Caso necessite de algum líquido para limpeza pode-se utilizar solução detergente ou à base de álcool. Limpe a tela suavemente e seque em seguida. Nenhum material de limpeza abrasivo ou solvente orgânico (como tiner) deve ser utilizado para limpar qualquer parte do instrumento.

Evite que a solução escorra para dentro do equipamento, pois a umidade pode danificar os componentes internos. Não utilize álcool e ou solventes químicos no Negatoscópio MD.

Armazenagem e Conservação

Não submeter o equipamento a contato com líquidos ou choques mecânicos, isso pode prejudicar a funcionalidade do aparelho. Armazene-o em local limpo e seco e em condições de temperatura adequadas (ambiente).

Precauções, Cuidados e Advertências

Se o aparelho não for utilizado por um período de tempo prolongado, ou durante transporte, retire o equipamento da energia elétrica.

Certifique-se que nenhum fluido ou condensação penetre no aparelho. Nunca coloque o aparelho em imersão em fluidos de qualquer natureza.

Garantia

O Negatoscópio MD possui garantia de um (1) ano após a data de entrega do aparelho ao usuário. A garantia cobre defeitos de materiais construtivos e de fabricação.

A garantia será perdida caso ocorram: uso indevido ou em desacordo com as instruções do fabricante, reparos não efetuados pela Assistência Técnica Autorizada ou qualquer outro dano.

Durante o período de garantia serão efetuados todos reparos e/ou trocas necessários sem nenhum custo adicional ao usuário.

Assistência Técnica

Consulte a Assistência sobre quaisquer dúvidas sobre o funcionamento ou operação do instrumento, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham a ser necessárias.

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.

Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 – Atuba

CEP 82600-070 – Curitiba - Paraná

(41) 2102-8344

suporte@macrosul.com



Descarte o equipamento de forma segura.



A marcação CE atesta que o produto foi fabricado em conformidade com as exigências das Diretrizes da União Européia, cumprindo os requisitos de segurança indicados nas normas em vigor.



Jinde Electron Technology Co., LTD
China



Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.
CNPJ: 95.433.397/0001-11
Curitiba - Paraná - Brasil
Resp. Téc. Carolina Verônica da Cruz Cebola
CRF/PR 21294