




Instruções para Montagem

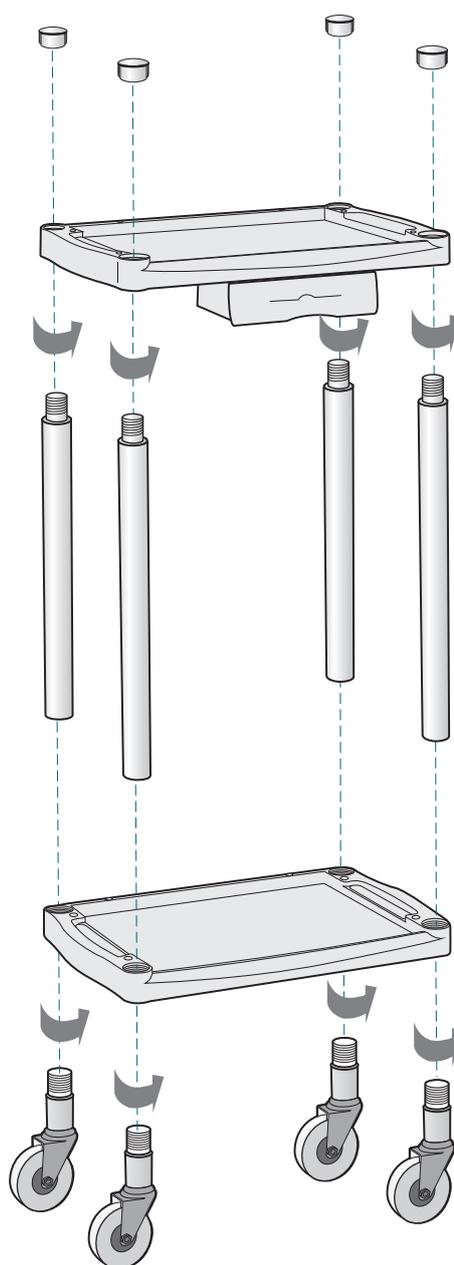

### 1 Tampas

Fixar as quatro tampas nos espaços próprios conforme as suas ranhuras de encaixe na parte superior da prateleira.



Ranhuras

### 2 Prateleira Superior

Ajustar as quatro hastes no encaixe inferior da prateleira às quatro tampas fixadas previamente.

### 3 Haste

Inserir cada haste no encaixe inferior da prateleira. Em seguida, gire-as no sentido anti-horário até ficar bem firme.



Ranhuras  
(superior e inferior)

### 4 Prateleira Inferior

Ajuste corretamente a prateleira no encaixe sob a haste.

### 5 Rodízios

Inserir corretamente as quatro rodas no encaixe da parte inferior da prateleira. Em seguida, gire cada uma no sentido anti-horário até ficar bem firme.



**Yeollin Sesang Co., Ltd.**  
Coréia do Sul



**Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda**  
CNPJ: 95.433.397/0001-11  
Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070  
Curitiba – PR  
Resp. Técnica Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294

#### Suporte Técnico

e-mail: [suporte@macrosul.com](mailto:suporte@macrosul.com)  
Site: [www.macrosul.com](http://www.macrosul.com)  
Telefone: (41) 2102-8344

#### Serviço de Atendimento ao Cliente

e-mail: [sac@macrosul.com](mailto:sac@macrosul.com)  
Telefone: (41) 2102-8300