



#### Suporte Técnico

e-mail: [suporte@macrosul.com](mailto:suporte@macrosul.com)  
Site: [www.macrosul.com](http://www.macrosul.com)  
Telefone: (41) 2102-8344

#### Serviço de Atendimento ao Cliente

e-mail: [sac@macrosul.com](mailto:sac@macrosul.com)  
Telefone: (41) 2102-8300

## Cabo Paciente para Eletrocardiógrafo Bionet



**Bionet Co., Ltd**  
5F, Shinsegae I&C Digital Center 61 Digital-ro 31 gil, Guro-gu, Seoul - 08375  
Coreia do Sul



**Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda**  
CNPJ: 95.433.397/0001-11  
Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070 Curitiba – PR  
Resp. Técnica Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294

Instruções de Uso do Cabo Paciente para Eletrocardiógrafo


## PRECAUÇÕES DE USO

Manuseie e armazene o **Cabo Paciente para Eletrocardiógrafo Bionet** de acordo com as instruções do fabricante, conforme abaixo:


### ⚠ ATENÇÃO!

- Não manuseie e/ou armazene o **Cabo Paciente para Eletrocardiógrafo Bionet** com a parte do conector do cabo dobrada, ou com os cabos ou conectores torcidos ou desalinhados.


- Certifique-se de que a parte do conector do cabo não esteja dobrada.

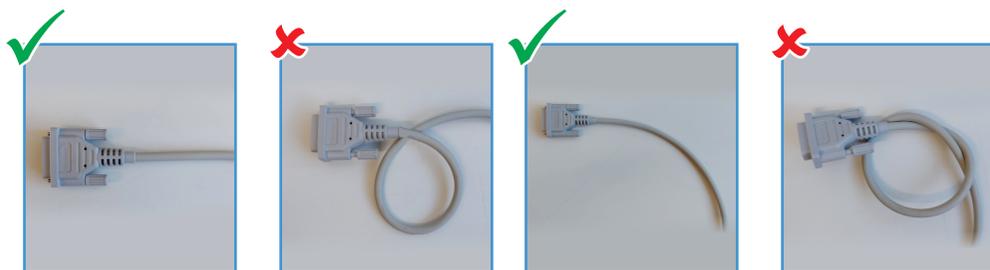


- Certifique-se de que o cabo de ECG não está dobrado ou torcido.
- Evite puxar o cabo com força excessiva ao desconectá-lo do equipamento.

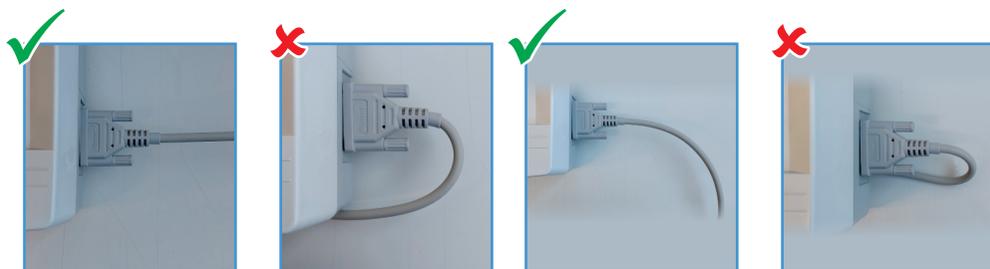

- Verifique se as ramificações dos cabos não estão dobradas.

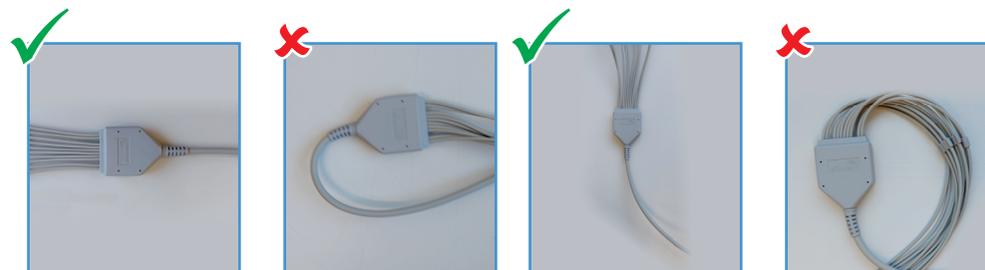

- Evite dobrar o conector que se encaixa ao eletrodo.

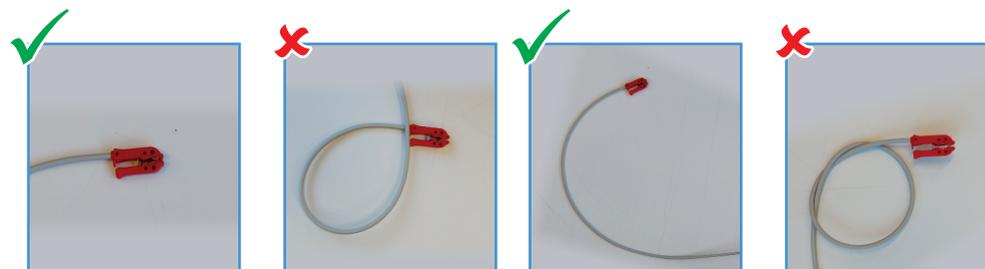

## ARMAZENAMENTO DO CABO

- Enrole o cabo em uma circunferência ampla para evitar danos internos no cabo.
- Evite armazenar o cabo de forma emaranhada ou amarrada.

